




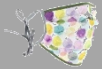




|                              | FFP2<br>   | CHIRURGICAL<br>   | VISIÈRE OU ÉCRAN<br>   | MASQUE A USAGE NON SANITAIRE CAT. 1<br>  | MASQUE A USAGE NON SANITAIRE CAT. 2<br>  | MASQUE « FAIT MAISON »<br>                                       |
|------------------------------|---|--|---|---|---|---|
| Caractéristiques générales ? | Appareil de protection respiratoire (norme NF EN 149)   | Dispositif médical (norme NF EN 14683)   | Équipement de protection des yeux et du visage (norme EN 166)   | Masque « grand public » (note du 29/03/20)*   | Masque « grand public » (note du 29/03/20)*   | Masque non normé et non testé   |
| Pourquoi et pour qui ?       | <p>Protège les porteurs à la fois contre l'inhalation de gouttelettes <b>ET</b> des particules en suspension dans l'air.</p> <p>Une barbe (même naissante) réduit l'étanchéité du masque et diminue son efficacité globale.</p> | <p>Protège l'entourage des gouttelettes du porteur.</p> <p>Protège le porteur contre les projections de gouttelettes émises en vis-à-vis.</p> <p>Protège les personnes à risque de forme grave de la COVID-19. Il existe plusieurs types : type I, type II et IIR* (particules de 3 microns).</p> <p>*Les types IIR sont destinés à un usage en chirurgie.</p> | <p>Protège les porteurs des grosses gouttelettes émises immédiatement par une personne à proximité et face à l'écran.</p> <p>Ne protège pas contre les particules restant en suspension (≠ masques de protection respiratoire).</p> | <p>Protège l'entourage des particules émises par le porteur (filtration &gt; 90% des particules de taille &gt; 3 microns)*.</p> <p>Pour les agents en <b>contact régulier</b> avec le public.</p> <p>*tests de filtration et perméabilité conduits par la Direction Générale de l'Armement (DGA). Masques reconnaissables au logo le spécifiant (ci-dessous).</p> | <p>Protège l'entourage des particules émises par le porteur (filtration entre 70% et 90% des particules de taille &gt; 3 microns)*.</p> <p>Pour des <b>contacts occasionnels</b> dans le cadre professionnel.</p> <p>Usage par l'ensemble des agents de la collectivité/service ou en présence d'autres porteurs de masque.</p> | <p>Répond à un usage personnel, son utilisation est <b>à proscrire</b> sur le lieu de travail au profit d'un masque des catégories précédentes.</p> |
| Durée d'utilisation ?        | 8h maximum sur une journée (cf. notice)   | 4h maximum <u>OU</u> s'il devient humide   | Jusqu'à <b>dégradation</b> éventuelle   | 4h maximum <u>OU</u> s'il est enlevé (boire, manger, fumer, etc.) <u>OU</u> s'il devient humide et endommagé  |   | -   |
| Comment l'entretenir ?       | Usage unique<br>Stockage masques neufs (cf. notice fabricant)   | Usage Unique<br>Stockage masques neufs (cf. notice fabricant)  | Désinfection avant et après utilisation<br>Contrôles visuels  | Stockage et entretien spécifique (cf. notice)<br>Programme de lavage 30 min > 60°C<br>Respect du nombre de lavages  |   | -   |
| Liens utiles                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>FAQ INRS</li> <li>Protocole national face à l'épidémie de COVID-19 (31/08/2020)</li> </ul>   |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Liste distributeurs (mise à jour régulière)</li> <li>FAQ INRS</li> <li>Protocole national face à l'épidémie de COVID-19 (31/08/2020)</li> </ul>  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Référentiel AFNOR</li> </ul>   |

